


# マグフィット® IP用アクセサリ

## 「マウンティングリング」

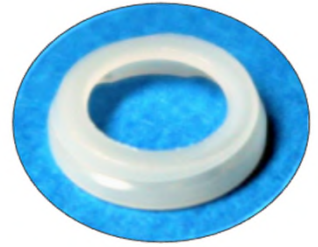

マグフィット®の磁石構造体をキーパー上の適切な位置に保持し、合着時に横ずれを防ぐ(低減する)ことを目的としたアクセサリです。

### 仕様

#### 1) 適用品番

品番	SMRDX6	SMRDX8	SMRDX9
適用磁石構造体	SXFL	DXFL DXD	DXF2L

#### 2) 構造と材質



材質: ポリアセタール

医療機器届出番号: 23B1X10004000004

#### 3) 専用リムーバ(別売)



材質: ステンレス鋼

医療機器届出番号: 23B1X10004000005

### 使用手順

#### 1) キーパーの装着




- ① ヒーリングアバットメントを外す。
- ② 適用するマグフィットIPキーパーを装着する。

#### 2) マウンティングリングのスペース確認とブロックアウト



- ① マウンティングリング、磁石構造体の順にキーパー上に設置する。
- ② 合着スペース(大きさ)の確認する。
- ③ リングと歯肉の隙間をブロックアウトする。

#### 3) 磁石構造体+リングの合着スペース確認及び調整

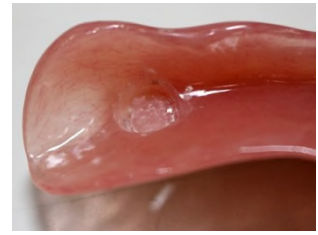

- ① 義歯の磁石構造体設置部に十分なスペースがあることを確認する。
- ② スペースが不十分な場合は、切削し調整する。

#### 4) 磁石構造体合着



通法に従い、磁石構造体を合着する(写真は合着後の状態)。

#### 5) リング取り外し



- ① 専用リムーバーをリングに差し込む。
- ② 反時計回りに回し、リングを取り外す。

#### 6) 維持力確認



義歯の維持力を確認する。

### 注意事項

- ① マウンティングリングの使用には、キーパーが歯肉から1mm突出している必要があります。
- ② 複数の磁石構造体を合着する際は、全ての磁石構造体を合着完了後に、まとめてマウンティングリングを外してください。



愛知製鋼株式会社

〒476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地  
フリーコール 0120-34-0632